


# PCR検査 唾液採取の方法

唾液採取で使用するもの




①

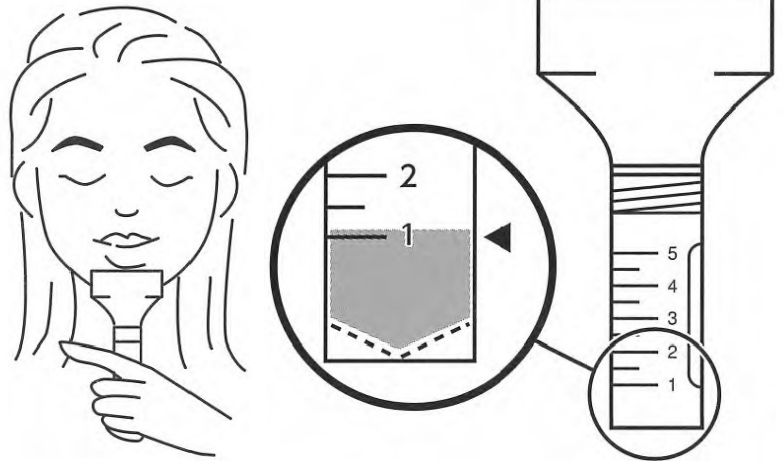

唾液を採取管のメモリ1くらいまで入れてください。泡などなるべく入らないよう気をつけてください。

②

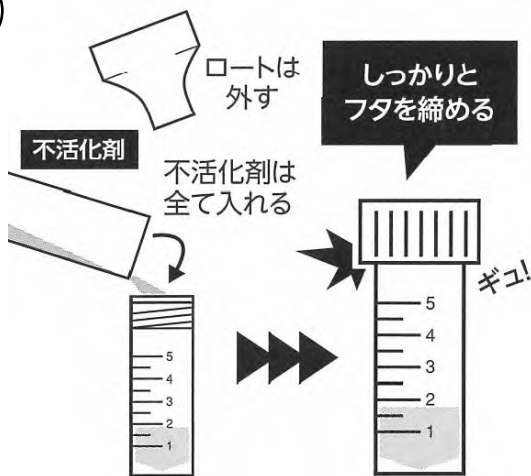

「ロート」を外し、不活化剤を採取管に入れて、フタをしっかりと締めてください。

※フタが締まっていないと検査ができない場合があります。

③



採取管をWチャック袋（透明の袋）に入れ、袋をしっかりと閉じてください。

①～③で完了です。

ゴミは白ビニール袋に入れて縛り、バットに入れてください。バーコードシールが貼ってある重要事項説明書のみお持ち帰りください。