


検体採取方法

鼻腔ぬぐい液の採取

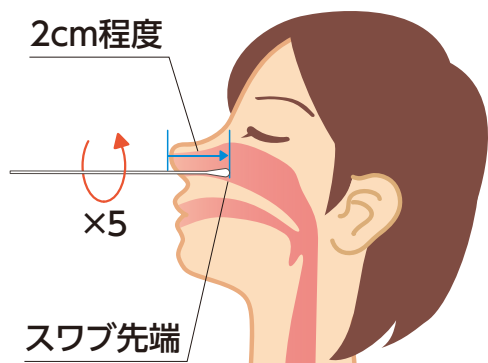

キット付属の滅菌綿棒を鼻腔部分（鼻腔から2cm程度の部分）に挿入し、滅菌綿棒を5回程度回転させながら擦るようにして粘膜表皮を採取する。

〈使用上の注意〉

- ご使用の際は、添付文書をよくお読みください。
- 本品の判定が陰性であっても、SARS-CoV-2感染を否定するものではありません。

操作方法

1 検体を抽出する



滅菌綿棒を検体抽出液に浸す。
検体抽出容器の外側から滅菌綿棒を指でつまんだり上下させて充分浸透させる。
その後、しごく様に滅菌綿棒を引き抜く。

2 ノズルを挿入する


抽出容器にノズルを挿入する。



3 滴下する

抽出容器は垂直を保持し、3滴を守ってご使用ください

テストプレートの試料滴下部に3滴滴下する。

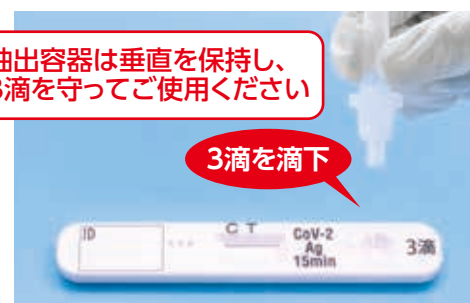

判定方法

陽性

CとT部分に赤紫色のライン
(陽性については、3～15分後)



15分以内でも、赤紫色のラインがCとTに認められたときは、陽性とする。

陰性

C部分のみに赤紫色のライン



無効

C部分に赤紫色のラインが認められない



別のテストプレートでやり直してください。

C：コントロールライン（確認部）
T：テストライン（判定部）

15分後に結果判定



参考動画〈チェックMR-COV19の使い方〉
動画でわかりやすく操作方法を紹介しています。
添付文書もご覧いただけます。

https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/check_mr-cov19/index.html

販売元 **Meiji Seika ファルマ株式会社**
東京都中央区京橋 2-4-16
<https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/>

製造販売元 **ROHTO**
ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

CCOV000701 ©
(MA)
作成：2021.10
09M-22Y